

ポリグリップ[®] パウダー 無添加 色素・香料を含みません

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 粘着型義歯床安定用糊材-粉末型

〔販売名:ポリグリップパウダーFa〕

(JMDNコード:16388010)

特徴

- パウダーなので、ムラなく均一に塗布することができます。
- だ液などの水分を含むと粘着力を出し、すぐれた安定力を発揮します。
- 製品の性質上、徐々に口の中に溶け出します。又、溶けてなくなることもありますが、溶けた成分を飲み込んでも特に問題はありませぬ。

禁忌・禁止

次の人は使用しないでください。

- 1) 本品による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
- 2) 入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状のある人。
- 3) 食べ物などの飲み込みが困難な人。(喉に詰まる、気管に入る恐れがある。)

形状、構造及び原理等

成分:ナトリウム／カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、カルボキシメチルセルロースナトリウム
形状:白色～淡黄色の粉末
原理:総入れ歯と口腔粘膜とを粘着力で維持させる

使用目的、効能又は効果

義歯床の安定用


品目仕様

粘着強さ 5kPa以上(注)

(注) kPaは入れ歯が粘着する力を示す単位、5kPaは日本工業規格(JIS)で規定されている粘着力の基準です。

操作方法又は使用方法等

1. 使用可能な入れ歯の材質、種類
 - プラスチック床、金属床の入れ歯に使用できます。
 - 本品は総入れ歯用です。部分入れ歯、ブリッジ、さし歯には使用しないでください。
2. 使用方法
 - ① 入れ歯をよく洗い、まだ湿っている間に、図のように適量をふりかけます。余分な粉末は入れ歯を軽くたたいてふり落とします。
 - ② 入れ歯を口にはめ込み、しばらくの間しっかりと押さえていただければ完了です。
 - ③ 入れ歯をはずす際には奥の方からはがすと、はずれやすくなります。

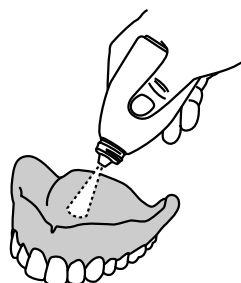

上あご用入れ歯



下あご用入れ歯

3. 洗浄法

製品が入れ歯や口の中に残っていたら、ガーゼなどで製品をよくぬぐってください。入れ歯はさらに歯ブラシなどを使って流水下でよくブラッシングしてください。又、入れ歯は必ず水の中に入れて保管してください。製品が溶けてなくなっても、同様に洗浄・保管してください。

使用方法に関する注意

使用中又は使用後に注意すること。

- ① 本品をつけた入れ歯は必ず就寝時にはずしてください。
- ② 本品をつけたまま入れ歯を乾燥させないでください。入れ歯をはずしたら、必ず水又はぬるま湯に浸しておいてください。(固まって取りにくくなるがある。)
- ③ 1回の塗布で翌日までの連続使用はしないでください。(菌の繁殖等、口腔衛生上良くないことがある。)

使用上の注意

1. 長期連用しないでください。連用する場合には歯科医師に相談してください。(歯ぐきがやせる、かみ合わせが悪くなるがある。)
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - ① 本品の使用中最又は使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状が現れた場合
 - ② 継続的な下痢や便秘の症状又は増強が見られた場合
3. 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とし、できるだけ早く歯科医師に入れ歯の調整を相談してください。

貯蔵・保管方法及び使用期間等

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをしっかりとめて保管してください。(本品は吸湿性があります)

包装

50g

お客様窓口

グラクソ・スミスクライン株式会社 お客様窓口
(電話:03-5786-5013)

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所

〔製造販売元〕 グラクソ・スミスクライン株式会社
〒151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15

〔製造業者〕 スタッフォードミラー(アイルランド)リミテッド
Stafford Miller (Ireland) Limited
アイルランド

〔発売元〕 アース製薬株式会社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

- 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合としてください。
- 定期的に歯科医師の診察を受け、必要な場合は入れ歯の調整を行ってください。